

HOOGWAARDIGE KWALITEIT GLIJLAKENS

GESCHIKT VOOR ALLE WENTELSYSTEMEN

- 95 x 205 cm
PW-0095
- 95 x 225 cm
PW-0095-225
- 105 x 205 cm
PW-0105
- 105 x 225 cm
PW-0105-225
- 125 x 205 cm
PW-0125
- 125 x 225 cm
PW-0125-225



DIT DOCUMENT IS GEDRUKT OP
100% GERECYCLED, FSC GECERTIFICEERD PAPIER

weTURN

ato form

Proturn®

GLIJLAKEN

ato form

Proturn® GLIJLAKENS



- 100% hoogwaardig nylon
- glad oppervlak
- lage glijweerstand
- wentelen met minimale wrijving
- minder kans wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95 °C

Wasvoorschrift:

- 95 °C machinewas
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Niet strijken
- Geen wasverzachter gebruiken



BEVESTIGEN:

Het glijlaken wordt als volgt aan het matras vastgemaakt:

- Vouw het glijlaken op het matras uit en leg het met de stiksels naar beneden.
- Plaats het elastiek om de 4 hoeken van het matras.
- Strijk het oppervlak van het glijlaken glad.
- Bevestig de 4 klittenbandsluitingen aan de lange zijde van het glijlaken rond de verstelbare delen (lattenbodem) van het bed.

Let op:

Als het glijlaken niet op de juiste manier vastgemaakt is, zullen de banden en mogelijk het systeem samen met het bed worden beschadigd bij verstelling van het bed.



by dan rehab
improving care

LET OP: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



Raadpleeg voor meer informatie
de handleiding van TurnAid

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl