

HOOGWAARDIGE KWALITEIT WENTELLAKENS

GESCHIKT VOOR ALLE WENTELSYSTEMEN

○ 180 x 350 cm
PW-0350

○ 180 x 400 cm
PW-0400

○ 180 x 450 cm
PW-0450



DIT DOCUMENT IS GEDRUKT OP
100% GERECYCLED, FSC GECERTIFICEERD PAPIER

weTURN

ato form

Proturn®

WENTELLAKEN

ato form

Proturn® WENTELLAKENS



- 50% katoen, 50% polyamide
- fijne weving
- lage glijweerstand
- minder warm gevoel
- minder kans op wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95° C

Wasvoorschrift:

- 95° C machinewas (ca. 4% krimp)
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Evt. strijken op gemiddeld temperatuur



BEVESTIGEN:

- Zet het wentelsysteem aan en plaats beide motorrollen omhoog met de klittenbandzijde naar boven gericht.
- Leg het wentellaken in het midden van het bed met de zachte klittenbandzijde onder.
- Bevestig dit klittenband vanaf het voeteneinde in één glijdende beweging van uw hand aan de rol, terwijl u het laken met de andere hand strak trekt tot het hoofdeinde.
- Het laken moet over de bovenzijde van de rol draaien. Bij een verkeerde bevestiging kunnen lichaamsdelen van de zorgvrager bekneld raken tussen het laken en de rol. De besturing levert alleen een laag vermogen bij het afrollen van het laken en stopt bij overbelasting.
- Wind ongeveer 3/4 van het laken op de motorrol, bevestig hier na het laken aan de andere rol.
- Trek het laken strak totdat het recht ligt, houdt het stiksel in het midden van het bed, zodat er aan beide zijden evenveel laken is.



by dan rehab
improving care

LET OP: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



Raadpleeg voor meer informatie
de handleiding van TurnAid

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl