

HANDLEIDING



Deze instructies moeten aan de gebruiker gegeven worden voor gebruik.
Lees het document aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.



VOOR MENSEN, DOOR MENSEN

1. Voorwoord	4
1.1 Digitale versie.....	4
2. Markering van de apparatuur.....	5
3. Technische specificaties	5
3.1 Technische specificaties	5
4. Instructies	6
5. Voorbereiding.....	7
5. Onderhoud	8
5.1 Schoonmaak	8
5.2 Wassen in de automatische wasstraat	8
5.3 Inspecties	8
6. Klachtrecht	8
7. Aantekeningen	10
Eigen aantekeningen.....	10

1. VOORWOORD

Gefeliciteerd met je nieuwe Doffie!

Dit is een originele gebruikershandleiding voor uw Doffie. In deze handleiding gebruiken we de term Product voor Doffie, tenzij anders specifiek vermeld.

BELANGRIJK



HET IS BELANGRIJK DAT JE DE HANDLEIDING BESTUDEERT VOORDAT JE HET PRODUCT GEBRUIKT

Doffie is een ergonomisch hulpmiddel dat zorgprofessionals kan helpen om werkprocessen te vereenvoudigen rondom het aanbrengen van compressiekousen, evenals voet- en beenzorg. Het product kan voor iedereen worden aangepast met behulp van de rollen en daarmee biedt het een oplossing voor het aanbrengen van steunkousen.

1.1 Digitale versie

De gebruikershandleiding en andere informatie over Doffie zijn te vinden op www.danrehab.dk en ww.ato.nl

 DOFFIE


 **ato**
TOEGEPASTE ORTHOTECHE

HANDLEIDING



Deze instructies moeten aan de gebruiker gegeven worden voor gebruik.
Lees het document aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.


Scan de QR-code voor de digitale
gebruikershandleiding

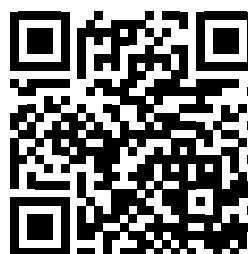

Deze gebruiksaanwijzing is door samenwerking tussen Dan Rehab en ATO tot stand gekomen

2. MARKERING VAN DE APPARATUUR

	Fabrikant
Danrehab A/S Tel. 86447355 DK-7160 Tørring	Naam fabrikant, tel. nr. en adres
	Het product voldoet aan alle eisen voor CE-markering
Doffie (HMI nr. 136861)	Productidentiteit (handelsnaam en HMI-nummer)
	Serienummer van het betreffende product
	QR-code (leidt naar extra informatie over het product)

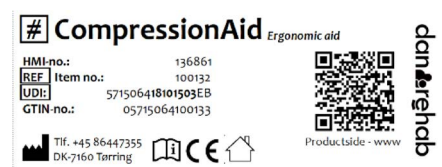

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

3.1 Technische specificaties

Netto gewicht: 2,3 kg

Materialen:

- Het bord zelf is gemaakt van compact laminaat
- De zwarte comfortrollers zijn gemaakt van PUR
- De zwarte buizen die de comfortrollers vasthouden zijn gemaakt van POM

Onder voorbehoud van technische aanpassingen.

4. INSTRUCTIES

Doffie is voor iedereen:

Je kunt de comfortabele rollen omhoog, omlaag en horizontaal aanpassen en instellen voor elke individuele zorgvrager.

Gebruik een inbussleutel maat 4 om deze in te stellen.



Plaats één hand in de holte van de knie en één rond de voet.

Buig het been tot ca. 90° met een licht glijdende beweging van de voet.

Plaats de Doffie onder het been.



De hoogste rol wordt onder de knie gepositioneerd.

Breng de steunkous die met de aantrekhelp (bv. Doff 'n Donner) is aangebracht bij de voet van de cliënt.

Rol de steunkous eenvoudig op.


4.INSTRUCTIES



De steunkous schuift gemakkelijk over de rollen – dit kan worden gedaan zonder de benen van de cliënt op te tillen



De aan-uittrekhulp rolt eenvoudig van het been van de cliënt af, zonder dat het been opgetild hoeft te worden.

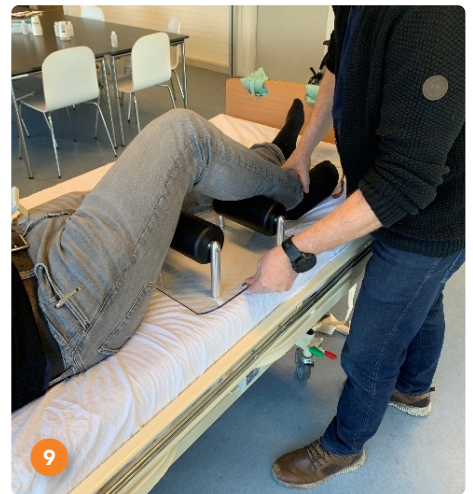

Buig het been opnieuw tot ca. 90°.



Haal Doffie voorzichtig onder het been vandaan.

5. ONDERHOUD

5.1 Schoonmaak

Om hygiënische redenen moet Doffie regelmatig worden schoongemaakt met desinfectiemiddelen en kan het een fijne reiniging met stromend water doorstaan.

Doffie kan worden gedesinfecteerd met de onderstaande aanbevolen desinfectiemiddelen:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Waterstofperoxide Aq. | 1,0% (maximaal) (Verdunde waterstofperoxide) |
| • Ethanolgebaseerde producten | 70-85 v/v%. Alcohol |
| • Zeepoplossingen | PH-waarde maximaal. 9 |

Gebruik GEEN hogedrukreiniger of een andere vorm van hogedrukreiniging, want dit kan blijvende schade aan de product veroorzaken.

5.2 Wassen in de automatische wasstraat

Wassen in de automatische wasstraat is toegestaan. Het is aan te raden om te wassen met ongeveer 55-60 graden en 5 bar druk op de machine.

5.3 Inspecties

Het product vereist minimaal onderhoud, maar het wordt aanbevolen om dagelijks de staat van het product te observeren. De onderstaande punten moeten dagelijks worden herzien voordat het product wordt gebruikt.

- Controleer regelmatig of alle schroeven goed vastzitten.
- Controleer of de rollen intact zijn.

6. KLACHTRECHT

Het recht op klacht geldt volgens de op elk moment geldende regels met betrekking tot het recht op klachten. Zie meer hierover in de verkoop- en leveringsvoorwaarden, die op onze website te vinden zijn.



OPMERKING:

Het recht op klachten kan vervallen als de aanbevolen inspecties niet worden uitgevoerd of als het product wordt gebruikt voor onbedoeld gebruik. Evenals bij het gebruik van niet-originele reserveonderdelen, zie het overzicht van reserveonderdelen.



Dit product moet worden gerecycled volgens nationale regelgeving.
Na het demonteren van het product moet je de onderdelen sorteren op basis van waaruit ze gemaakt zijn en ze afzonderlijk recyclen.
Neem indien nodig contact op met uw lokale recyclingcentrum voor advies.

7. AANTEKENINGEN

Eigen aantekeningen



Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 -77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl