

## HANDLEIDING



Deze instructies moeten aan de gebruiker gegeven worden voor gebruik.  
Lees het document aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.



**VOOR MENSEN, DOOR MENSEN**

# GEbruikersHANDLEIDING ELEMENTAL WALL - DOUCHEBRANCARD

Elemental Wall is een in hoogte verstelbare douchebrancard, speciaal ontworpen voor het douchen van liggende cliënten in de doucheruimte.



## WAARSCHUWING

**Om letsel te voorkomen, moet u altijd eerst de Gebruikershandleiding en de bijbehorende documenten lezen voordat u het product in gebruik neemt.**



## LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING

### Informatie voor de ingebruikname/ Werking van de douchebrancard.

1. Lees vóór gebruik zorgvuldig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
3. Het product mag alleen worden gebruikt door personeel dat vertrouwd is met de werking ervan.
4. Onderhoud, evenals veiligheids- en technische controles, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicebedrijf of een ander professioneel bedrijf dat door Koval is geautoriseerd.
5. Montage, wijzigingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicebedrijf of een ander professioneel bedrijf dat door Koval is geautoriseerd.
6. Indien technische wijzigingen, waaronder upgrades of revisies van de producten, niet worden uitgevoerd door Koval of een ander professioneel servicebedrijf dat door Koval is geautoriseerd, vervalt elke garantie op dergelijke wijzigingen, evenals op producten waarop deze wijzigingen zijn uitgevoerd.

### Preventieve maatregelen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel. Volg altijd de aanwijzingen onder de:

## WAARSCHUWING

### Beoogd gebruik

Dit hulpmiddel is bedoeld voor ondersteuning bij hygiënische zorg, in het bijzonder bij het douchen van bewoners in zorgomgevingen zoals seniorenwoningen/assisted living, instellingen voor speciale zorg, medische instellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatieafdelingen en andere zorginstellingen. Het hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

### Regelgeving en normen

Zorg altijd voor naleving van de geldende normen en voorschriften.

### CE-markering

De CE-markering verwijst naar de Verordening medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).

### Verantwoordelijkheid en garantie

De fabrikant van het product is verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het product, op voorwaarde dat:

- A: Het product uitsluitend wordt gebruikt voor het beoogde doel.
- B: Functionele controles regelmatig worden uitgevoerd.

### Transportschade

Controleer bij levering het product en de verpakking op beschadigingen. Houd altijd rekening met de leverdatum: zichtbare schade dient binnen 2 dagen na levering te worden gemeld en verborgen schade binnen 7 dagen na levering.

## Serienummer

Het serienummer bevindt zich op het productlabel, dat zich aan de onderzijde van de wandgemonteerde douchebrancard kan bevinden.

## Onderdelenbenaming

1. Douchematras
2. Hoofdkussen
3. Afvoer
4. Afvoerslang
5. Zijhekken
6. Hek voor het hoofd- en voeteneind
7. ligvlak douchebrancard
8. Veiligheidsmechanisme
9. Elektrische actuator
10. Control box
11. Handbediening
12. Plastic cover



## Technische Specificaties

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Product code:                   | 10068990 – L1-EL |
| Douchebrancard ligvlak breedte: | 700 mm           |
| Douchebrancard ligvlak lengte:  | 1900 mm          |
| Douchebrancard ligvlak hoogte:  | 350 - 1000 mm    |
| Douchebrancard ligvlak helling: | 3°               |
| Lengte:                         | 2070 mm          |
| Breedte:                        | 810 mm           |
| Gewicht:                        | 84 kg            |
| Veilige werklust:               | 175 kg           |

## Ingebruikname

Pak Elemental Wall uit en monteer deze aan de wand. Raadpleeg de installatie-instructies voor de wandgemonteerde douchebrancard.

Het Douchematras wordt ondersteboven vervoerd. Verwijder de folie waarmee het matras is vastgezet en draai het om. Neem de afvoerslang en leid deze door de afvoeropening in het ligvlak van de douchebrancard. Klap de zijhekken omhoog.

Elemental Wall is nu klaar voor gebruik.

## Gebruik van het product

### Hoogte instellen.

Het omhoog en omlaag bewegen van de douchebrancard wordt bediend met de handbediening.


Om het ligvlak van de wandgemonteerde douchebrancard omhoog te bewegen, drukt u op de pijl OMHOOG **(1)** op de handbediening en stelt u de gewenste positie in.

Om het ligvlak van de wandgemonteerde douchebrancard omlaag te bewegen, drukt u op de pijl OMLAAG **(2)** op de handbediening en stelt u de gewenste positie in.



### Zijhekken omhoog of omlaag klappen.

Om de zijhekken omhoog of omlaag te klappen, knijpt u met één hand de vergrendelpennen naar elkaar toe om het zijhek te ontgrendelen. Klap vervolgens de zijhekken omhoog of omlaag.

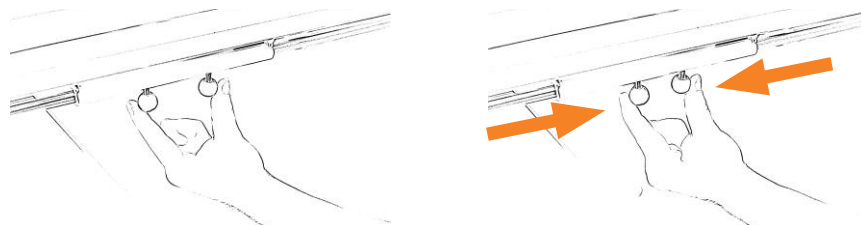

## Opbergen van de douchebrancard.

De douchebrancard wordt in de opbergstand veilig vastgehouden door gasveren en het veiligheidsmechanisme. Houd de brancard met één hand vast en verwijder het veiligheidsmechanisme met de andere hand voordat u het ligvlak uitklapt. Ondersteun de brancard met uw hand of lichaam wanneer u deze naar beneden klapt om schade te voorkomen. De ingebouwde gasveren maken het eenvoudig om de brancard in de gebruikspositie naar beneden te klappen en na gebruik weer tegen de wand op te klappen. Zorg ervoor dat het veiligheidshek eerst wordt weggeklapt voordat de douchebrancard opgeborgen wordt.

### WAARSCHUWING

- **Om te voorkomen dat de cliënt valt of dat de verzorger letsel oploopt, zorg ervoor dat er tijdens het verplaatsen van de cliënt naar de douchebrancard twee verzorgers aanwezig zijn indien dit noodzakelijk is gezien de toestand van de cliënt.**
- **Om letsel te voorkomen, laat de cliënt nooit onbeheerd achter.**
- **Om letsel tijdens het douchen van de patiënt te voorkomen, klap de zijhekken omhoog en vergrendel ze in de verticale stand voordat u de cliënt doucht (zie figuur 1).**
- **Om kruisbesmetting te voorkomen, desinfecteer de douchebrancard regelmatig tussen elk gebruik**
- **Om te voorkomen dat de cliënt verdrinkt, houd het hoofd van de cliënt altijd boven water en zorg dat er tijdens het douchen twee of meer verzorgers aanwezig zijn.**
- **Houd afstand van bewegende onderdelen wanneer de douchebrancard omhoog of omlaag wordt gebracht.**



Figuur 1

## Onderhoud

Het wordt aanbevolen de douchebrancard regelmatig tussen elk gebruik schoon te maken en/of te desinfecteren, indien nodig, in ieder geval dagelijks. Reinig het product met een vochtige doek, warm water en een desinfecterend schoonmaakmiddel.

De douchebrancard heeft een afneembaar PVC-gecoat matras dat na elk gebruik gewassen en schoongemaakt moet worden. Zorg ervoor dat de Materiaalveiligheidsbladen (MSDS) beschikbaar zijn voor het gebruikte desinfectiemiddel.

**Opmerking:** Wees voorzichtig met het gebruik van alcoholhoudende reinigingsmiddelen met een concentratie hoger dan 40%, omdat het ligvlak anders beschadigd kan raken.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, zoals trichloorethyleen, omdat dit het PVC-matras kan beschadigen. Gebruik ook geen desinfectiemiddelen op basis van jodium, omdat deze vlekken kunnen achterlaten. Spoel het materiaal na reiniging altijd af met warm water en veeg het droog met een doek.

## Veiligheids- en technische controles

Conform de Wet op medische hulpmiddelen dienen de veiligheids- en technische controles één keer per jaar te worden uitgevoerd.

## Reparaties, service en onderdelen

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met Koval of ATO.

Ontwerpbeleid en copyright

© Koval 2022.

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende verbeteringen behouden wij ons het recht voor om ons ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De inhoud van deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Koval. REV 19/09/2022



Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 -77 34 214  
info@ato.nl | www.ato.nl