



HANDLEIDING



Deze instructies moeten aan de gebruiker gegeven worden voor gebruik.
Lees het document aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.



VOOR MENSEN DOOR MENSEN

Gefeliciteerd met uw nieuwe WeCare douche-toiletstoel!

Dit is een originele gebruikershandleiding.




HET IS BELANGRIJK DAT U DE HANDLEIDING GEHEEL DOORLEEST VOORDAT U DE STOEL IN GEBRUIK NEEMT.

De douche-toiletstoel Standard is voor gebruik tijdens toiletgang en bad/hygiëneverzorging van de zorgvrager. Standard is een degelijke, verrijdbare douche-toiletstoel die met behulp van vele accessoires naar de specifieke behoeften van de zorgvrager kan worden ingesteld.



Elektronische versie

Er is een online-versie van de gebruiksaanwijzing beschikbaar. Deze kunt u altijd op onze website vinden.

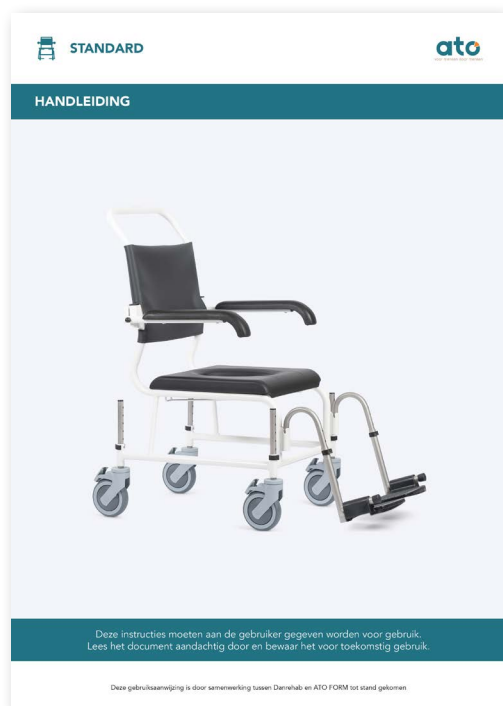

U kunt meer over het product lezen op onze website:
www.ato.nl

SPECIFICATIES

HMI-nr. 44448 - Standard M:	Max. Belasting 150kg
HMI-nr. 52711 - Standard L:	Max. Belasting 200kg
HMI-nr. 44467 - Standard XL:	Max. Belasting 200kg

HOE U DE ZITHOOGTE INSTELT

1. Trek de vergrendelingen (A) eruit - één been tegelijk.
 2. Trek/duw de telescopische poten (B) naar binnen/buiten tot de gewenste lengte.
 3. Zet de vergrendelingen erin – zorg ervoor dat ze stevig op hun plaats zitten!
- **IN GEVAL VAN ZIJWAARTSE VERPLAATSING:** Klap de armleuningen van de stoel omhoog om de verplaatsing te vergemakkelijken. De armleuning kan ook worden voorzien van een slot, zodat deze niet onbedoeld omhoog klapt (bijvoorbeeld in het geval van onrustige gebruikers).
 - **BIJ HET IN- EN UITSTAPPEN:** Zorg er altijd voor dat de remmen van de wielen NIET onder de stoel “wijzen”. De wielen MOETEN worden vergrendeld voordat de gebruiker gaat zitten. (Standaard wordt de stoel geleverd met vier 125 mm remwielen.)
 - **VOOR TOILETGEBRUIK:** Plaats de stoel over de toiletpot en vergrendel de wielen.
 - **VOOR BADGEBRUIK:** De stoel kan worden uitgerust met een zittingsinzet, deze wordt in de toiletopening van de zitting geplaatst. Hierdoor kan de gebruiker tijdens het baden comfortabel rechtop zitten.

WAARSCHUWING

Bij het in- en uitstappen van de stoel en het kantelen **MOETEN** de wielen van de stoel **ALTIJD** vergrendeld zijn. De rempedalen van de wielen (D) mogen **NIET onder de stoel “wijzen”!**

WAARSCHUWING

In het geval de gebruiker sterk naar voren leunt, kunnen er kantelproblemen optreden als de voorwielen van de stoel niet vergrendeld zijn en als de rempedalen niet naar voren wijzen.

WAARSCHUWING

Bij het in- en uitstappen van de gebruiker moet u alert zijn op eventueel kantelgevaar. **GA DAAROM NOOIT OP DE VOETPLATEN VAN DE VOETSTEUNEN STAAN!**

WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat u niet het volledige lichaamsgewicht op de armleuningen mag plaatsen.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Reinig de stoel met gewone, niet-bijtende reinigingsmiddelen en spoel hem daarna af. Droog de stoel vervolgens af met een zachte doek.
2. De stoel is bestand tegen reiniging tot 85 °C gedurende 3 minuten.
3. De wielen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en, indien nodig, worden vastgedraaid. Houd ze bovendien haarfrij om optimale rijprestaties te behouden.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN VOETSTEUNEN

Elk paar voetsteunen bestaat uit twee in hoogte verstelbare voetsteunen (één voor de rechter- en één voor de linkervoet).

1. Plaats de voetensteun in de beugel (A), die aan de voorpoot van de stoel is gelast. Aan elke kant van de beugel bevindt zich een gleuf waarin de “knoppen” van de voetsteun schuiven, waardoor u de voetsteun voor zijdelingse rotatie vergrendelt.

WAARSCHUWING

Deze sleuven kunnen scherpe randen hebben, wat voor verwondingen kan zorgen als de voetsteunen niet op de stoel zijn gemonteerd.

2. Als u de voetsteun naar de zijkant wilt uitklappen: Til de voetsteun ruim 1 cm verticaal op, het gemakkelijkst in de kromming. Schuif de ‘knoppen’ uit de sleuven en draai de voetsteun naar de zijkant.
3. De lengte van de voetsteun kan worden aangepast door de vergrendelingsclip (C) te verwijderen en vervolgens de binnenbuis van de voetsteun naar de gewenste lengte te trekken of te duwen. Vergeet niet om de vergrendelingsclip van de voetsteun na het instellen weer op zijn plaats te zetten.
4. De voetsteunen kunnen worden uitgerust met een kuitband of enkelsteunen van kunstleer (met klittenbandsluiting voor een strakkere of lossere pasvorm) en een ongedeelde gewatteerde voetplaat die bovenop de twee bestaande voetplaten kan worden geplaatst. De voetsteunen kunnen langer of korter worden geleverd als een gebruiker bijzonder lange of korte benen heeft.

WAARSCHUWING

Bij het instellen dient u rekening te houden met het altijd aanwezige risico op beknelling.

AFVALVERWIJDERING



Dit product moet volgens de nationale regelgeving gerecycled worden. Sorteer na het demonteren van het product de componenten op basis van waar ze van gemaakt zijn en recycle ze afzonderlijk. Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke recyclingpunt voor advies.



Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 -77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl