

HANDLEIDING



Deze instructies moeten aan de gebruiker gegeven worden voor gebruik.
Lees het document aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.



VOOR MENSEN, DOOR MENSEN

INHOUD

1. Inhoud.....	3
2. Productomschrijving	4
3. Onderdelenoverzicht.....	4
4. Benodigdheden	5
5. Veiligheidsinstructies.....	5
6. Montage-instructie	6
7. Eindcontrole	9
8. Onderhoud en controle	9

2. PRODUCTOMSCHRIJVING

De TurnAid Onefit is een universele montagebeugel voor bevestiging aan het frame van een zorgbed. Dankzij de meerdere aansluitpunten kan de beugel op verschillende bedtypes worden gemonteerd.

Na montage van de bracket kan de TurnAid veilig op de TurnAid Onefit worden geplaatst.

3. ONDERDELENOVERZICHT



Basis set (PW-100568) bestaande uit:

- TurnAid Onefit basisbalken (1)
- Achterplaten (2)
- Montagebeugels (3)
- Bevestigingsbouten t.b.v. achterplaten 8 stuks (4)
- Montagebouten 16 stuks (5)
- Borgmoeren 16 stuks (6)

Onefit flexplaten (7) dienen los mee besteld te worden.

4. BENODIGDHEDEN

PW-100569	TurnAid Onefit flexplaat 40mm (set van 4 stuks)
PW-100570	TurnAid Onefit flexplaat 55mm (set van 4 stuks)
PW-100571	TurnAid Onefit flexplaat 160mm (set van 4 stuks)
PW-100572	TurnAid Onefit flexplaat 185mm (set van 4 stuks)
PW-100573	TurnAid Onefit flexplaat 200mm (set van 4 stuks)
PW-100574	TurnAid Onefit flexplaat 240mm (set van 4 stuks)
PW-100575	TurnAid Onefit flexplaat 100mm (set van 4 stuks)
PW-100577	TurnAid Onefit flexplaat 70mm (set van 4 stuks)
PW-100652	TurnAid Onefit flexplaat 135mm (set van 4 stuks)

Benodigd gereedschap:

- Meetlint
- Inbussleutel
- Steeksleutel of dopsleutel

5. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Monteer de TurnAid Onefit uitsluitend op een stabiel en onbeschadigd bedframe.



Zorg dat bewegende delen van het bed vrij kunnen blijven bewegen.



Controleer na montage altijd alle bevestigingen.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde bevestigingsmaterialen.

6. MONTAGE-INSTRUCTIE

Stap 1 – Positie bepalen

1. Neem de TurnAid Onefit basisbalk (1) met de 6 aansluitpunten.
2. Houd de basisbalk (1) tegen het bedframe op de gewenste montagepositie.
3. Controleer welke twee aansluitpunten gebruikt kunnen worden voor een stevige montage.



Zorg dat het inlegram en andere bewegende delen van het bed nergens worden gehinderd.

Stap 2 – Afstand meten

1. Meet de afstand van het bedframe tot de buitenzijde van het bed.
2. Noteer de gemeten afstand.

Stap 3 – Juiste maat flexplaat bepalen


1. Trek 2 cm af van de gemeten afstand.
2. De uitkomst is de benodigde maat van de flexplaat. (7)

Formule:

Gemeten afstand – 2 cm = maat flexplaat

Stap 4 – Flexplaat kiezen

1. Selecteer de flexplaat (7) met de juiste maat.
2. Wanneer er geen flexplaat (7) beschikbaar is in de exact gemeten maat, kies dan de dichtstbijzijnde beschikbare flexplaat. Let op deze mag niet korter zijn dan de gemeten lengte.

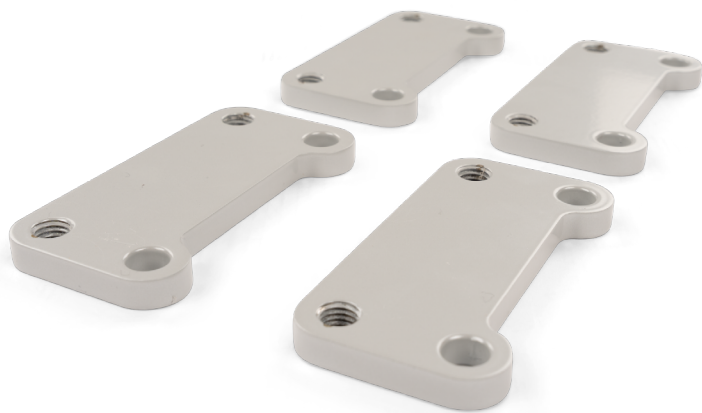

Voorbeeld van de Onefit flexplaten. (7)

Indien nodig kan de maat worden aangepast met één of meerdere verbredingsplaten (artikel PWE-4093) :

- Maximaal 2 verbredingsplaten toegestaan
- Elke verbredingsplaat (PWE-4093) verbreedt met 1 cm
- Maximale totale verbreding: 2 cm

Let op bij verlenging met verbredingsplaat dient de bevestigingsbout ook verlengt te worden.

Bij 1 plaat gebruik je bout 10x60 (PWE-4096= set van 8stuks)

Bij 2 platen gebruik je de bouten 10x70 (PWE-4100 =set van 8 stuks)

6. MONTAGE-INSTRUCTIE

Stap 5 – Flexplaat monteren

1. Plaats de flexplaat (7) op de twee gekozen aansluitpunten van de basisbalk (1).
2. Monteer de flexplaat met de inham naar boven.
3. Monteer vervolgens de bevestigingsbeugel (3) aan de andere zijde van de flexplaat.(7)

Stap 6 – Boutverbinding monteren

De aansluitpunten op de basisbalk, flexplaat en montagebeugels zijn voorzien van:

- één gat zonder draad
- één gat met schroefdraad

Monteer de boutverbinding als volgt:

1. Steek de montagebout (5) door het gat zonder draad.
2. Draai de Montagebout (5) vervolgens vast in het gat met schroefdraad.
3. Draai aan de achterzijde een borgmoer (6) op de montagebout (6).
4. Draai alle bevestigingen stevig vast met de inbussleutel en steeksleutel of dopsleutel.



Hierdoor kan de bout niet loskomen tijdens gebruik.



De inham moet naar boven wijzen om te voorkomen dat de flexplaat in aanraking komt met het inlegraam.



Detail van aansluitpunten op basisbalk (1) met gat zonder draad en schroefdraad.



Voorbeeld bracket in een geheel.

6. MONTAGE-INSTRUCTIE

Stap 7 – TurnAid plaatsen

1. Monteer de bracket door alvast 1 bout in het bovenste gat te doen van de montagebeugel (3) en verbind deze met de achterplaat (2), plaats vervolgens de OneFit bracket op het bed.
2. Draai daarna de onderste bevestigingsbout (8) erin en draai beide bouten handvast.
3. Controleer of de TurnAid Onefit stevig en correct gemonteerd is.
4. Plaats vervolgens de TurnAid op de gemonteerde bracket volgens de gebruiksinstructies van de TurnAid.



Voorbeeld van volledige montage.

7. EINDCONTROLE

- ✓ Alle bouten stevig vastzitten
- ✓ Borgmoeren correct zijn aangebracht
- ✓ Het inlegraam vrij kan bewegen
- ✓ Geen bewegende delen worden gehinderd
- ✓ De TurnAid Onefit stabiel en veilig gemonteerd is
- ✓ De TurnAid correct geplaatst is

8. ONDERHOUD EN CONTROLE



Controleer periodiek of alle boutverbindingen nog goed vastzitten.



Inspecteer de bracket regelmatig op slijtage of beschadigingen.



Gebruik het product niet bij zichtbare schade of vervorming.



Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl