

weTURN

HOOGWAARDIGE KWALITEIT GLIJLAKENS

GESCHIKT VOOR ALLE WENTELSYSTEMEN

○ 95 x 205 cm
PW-0095

○ 95 x 225 cm
PW-0095-225

○ 105 x 205 cm
PW-0105

○ 105 x 225 cm
PW-0105-225

○ 125 x 205 cm
PW-0125

○ 125 x 225 cm
PW-0125-225



- 100% hoogwaardig nylon
- glad oppervlak
- lage glijweerstand
- wentelen met minimale wrijving
- minder kans wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95 °C

WASVOORSCHRIFT:

- 95 °C machinewas
- Drogen droogtrommel op normale temperatuur
- Niet strijken
- Geen wasverzachter gebruiken

DEZELFDE LAKENS, VERANTWOORD GEBRUIKT

Dit laken is al eens gebruikt. Het is gewassen volgens de voorschriften. U ervaart dezelfde kwaliteit, maar helpt ons hiermee om verspilling te voorkomen.



BEVESTIGEN:

HET GLIJLAKEN WORDT ALS VOLGT AAN HET MATRAS VASTGEMAAKT:

- Vouw het glijlaken op het matras uit en leg het met de stiksels naar beneden.
- Plaats het elastiek om de 4 hoeken van het matras.
- Strijk het oppervlak van het glijlaken glad.
- Bevestig de 4 klittenbandsluitingen aan de lange zijde van het glijlaken rond de verstelbare delen (lattenbodem) van het bed.



LET OP:

- Als het glijlaken niet op de juiste manier vastgemaakt is, zullen de banden en mogelijk het systeem samen met het bed worden beschadigd bij verstelling van het bed.
- De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van TurnAid

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl

weTURN

HOOGWAARDIGE KWALITEIT WENTELLAKENS

GESCHIKT VOOR ALLE WENTELSYSTEMEN

○ 180 x 350 cm
PW-0350

○ 180 x 400 cm
PW-0400

○ 180 x 450 cm
PW-0450



- 50% katoen, 50% polyamide
- fijne weving
- lage glijweerstand
- minder warm gevoel
- minder kans op wrijvingsplekken
- wasbaar tot 95° C

WASVOORSCHRIFT:

- 95° C machinewas (ca. 4% krimp)
- Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
- Evt. strijken op gemiddeld temperatuur

DEZELFDE LAKENS, VERANTWOORD GEBRUIKT

Dit laken is al eens gebruikt. Het is gewassen volgens de voorschriften. U ervaart dezelfde kwaliteit, maar helpt ons hiermee om verspilling te voorkomen.



BEVESTIGEN:

- Zet het wentelsysteem aan en plaats beide motorrollen omhoog met de klittenbandzijde naar boven gericht.
- Leg het wentellaken in het midden van het bed met de zachte klittenbandzijde onder.
- Bevestig dit klittenband vanaf het voeteneinde in één glijdende beweging van uw hand aan de rol, terwijl u het laken met de andere hand strak trekt tot het hoofdeinde.
- Het laken moet over de bovenzijde van de rol draaien. Bij een verkeerde bevestiging kunnen lichaamsdelen van de zorgvrager bekneld raken tussen het laken en de rol. De besturing levert alleen een laag vermogen bij het afrollen van het laken en stopt bij overbelasting.
- Wind ongeveer 3/4 van het laken op de motorrol, bevestig hierna het laken aan de andere rol.
- Trek het laken strak totdat het recht ligt, houdt het stiksel in het midden van het bed, zodat er aan beide zijden evenveel laken is.

LET OP: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van TurnAid

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl