

SNELGIDS - DOFFIE

ato form

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



DOFFIE
aankleedhulpmiddel

Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



De zorgverleners die Doffie bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO FORM of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Doffie bedienen. ATO FORM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



Plaats één hand in de holte van de knie en één rond de voet.



Buig het been tot ca. 90° met een licht glijdende beweging van de voet.



Plaats de Doffie onder het been.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Doffie

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl

SNELGIDS - DOFFIE


Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



De hoogste rol wordt onder de knie positioneerd.



Breng de steunkous die met Doffie is aangebracht bij de voet van de cliënt.

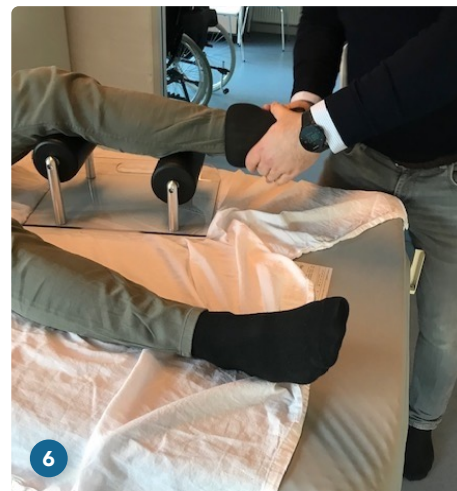

Rol de steunkous eenvoudig op.



De steunkous schuift gemakkelijk over de rollen – dit kan worden gedaan zonder de benen van de cliënt op te tillen



Doffie rolt eenvoudig van het been van de cliënt af, zonder dat het been opgetild hoeft te worden.



Buig het been opnieuw tot ca. 90°.



Haal Doffie voorzichtig onder het been vandaan.



“Doffie maakt het aan- en uittrekken van steunkousen eenvoudig, mijn rug wordt veel minder belast. Ook bij wond- en voetverzorging is het handig.

Het is ook ideaal dat Doffie naadloos aansluit op diverse kousenaantrek-kers.”