

SNELGIDS DOFFIE

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



DOFFIE aankleedhulpmiddel



Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



De zorgverleners die Doffie bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Doffie bedienen.

ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



1



2



3

Plaats één hand in de holte van de knie en één rond de voet.

Buig het been tot ca. 90° met een licht glijdende beweging van de voet.

Plaats de Doffie onder het been.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Doffie

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl

SNELGIDS DOFFIE


Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



De hoogste rol wordt onder de knie gepositioneerd.



Breng de steunkous die met de aantrekhelp (bv. Doff 'n Donner) is aangebracht bij de voet van de cliënt.

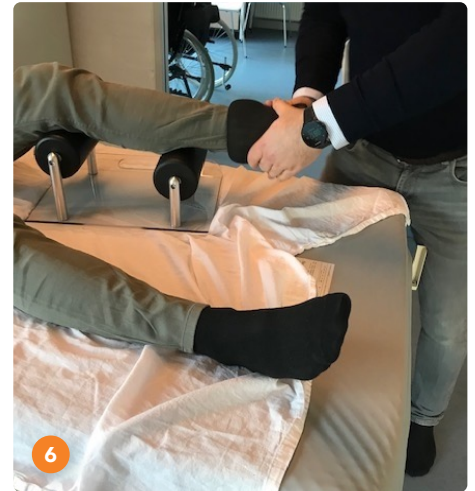


Rol de steunkous eenvoudig op.



De steunkous schuift gemakkelijk over de rollen – dit kan worden gedaan zonder de benen van de cliënt op te tillen




De aantrekhelp rolt eenvoudig van het been van de cliënt af, zonder dat het been opgetild hoeft te worden.

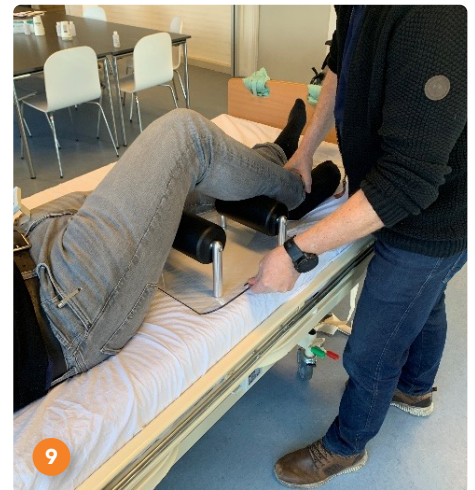

Buig het been opnieuw tot ca. 90°.



Haal Doffie voorzichtig onder het been vandaan.

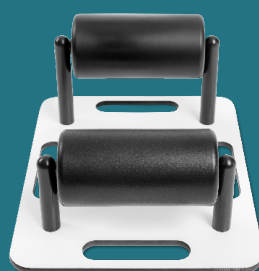

"Doffie maakt het aan- en uittrekken van steunkousen eenvoudig, mijn rug wordt veel minder belast. Ook bij wond- en voetverzorging is het handig.

Het is ook ideaal dat Doffie naadloos aansluit op diverse kousen-aantrekkers."

