

SNELGIDS EKAMOVE



Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

BEDIENINGSPANEEL



- 1 Plustoets
- 2 Mintoets
- 3 Programmaweergave
- 4 Tijdweergave
- 5 Programmekeuze
- 6 Hoek
- 7 Tijd
- 8 Start
- 9 Stop

Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



De zorgverleners die EkaMove bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen EkaMove bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



1. Zet aan met de hoofdschakelaar. Het systeem kalibreert de sensoren.

2. Houd Prog. ingedrukt en kies met plus/min: LNR, LR, LN, RN of LNR P5.
L: Linkerzijde,
R: Rechterzijde,
N: Rugligging, P5: Vrij programmeerbaar

3. Houd Angle ingedrukt en stel de hoek in.

4. Houd Time ingedrukt en stel de tijd in.

5. Houd Start ingedrukt. Zijde en hoek knipperen tot de hoek is bereikt.

Zorgmodus

Houd tijdens een actieve positionering de toets Time ingedrukt. Het systeem gaat 30 minuten in zorgmodus, zodat je de zorgvrager rustig kunt verzorgen zonder dat de positionering doorloopt. Druk op Stop om het programma weer te starten.



LET OP: Gebruik het EkaMove-systeem niet zonder bedhekken. Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat het systeem in gebruik wordt genomen.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van EkaMove

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl

SNELGIDS EKAMOVE



Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

IN DE DOOS

- 1 Bedieningspaneel
- 1 Luchtkamersysteem
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 Draagtas voor transport en opslag



1. Plaats het luchtkamersysteem in de breedte gecentreerd, met de bovenzijde gelijk aan de bovenzijde van de lattenbodem.



2. Zet het vast met de zes bevestigingsbanden.



3. Leg het schuimmatras over het luchtkamersysteem.



LET OP: Leid de slangen en kabels zo dat ze niet bekneld kunnen raken.

1. Vergrendelbare netaansluiting

Voor de voedingskabel.

2. Sensoraansluiting

Voor de sensorkabel voor het luchtkamersysteem.

3. Geheugenkaartsleuf

Voor het opslaan van wisselliggingen.



4. Aansluiting

luchtkamersysteem links

Sluit hier de linker slang aan.

5. Aansluiting

luchtkamersysteem rechts

Sluit hier de rechter slang aan.

6. Hoofdschakelaar

Schakelt het systeem aan en uit. Door het systeem met de hoofdschakelaar in te schakelen, gaat het systeem naar de basisinstelling en worden de sensoren gekalibreerd.



1. Bevestig de bedieningspaneel met het klemstelsel aan het voeteneinde van het bed.



2. Sluit de toevoerslangen en de sensorkabel aan op de bedieningspaneel. De koppelingen maken een hoorbare klik wanneer ze correct zijn aangesloten.



3. Sluit de rechter slang aan op de rechter aansluiting en de linker slang op de linker aansluiting.



4. Sluit de bedieningspaneel aan op het stroomnet door de voedingskabel aan te sluiten op het bedieningspaneel. Steek de stekker in het stopcontact.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van EkaMove

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl