

Snelgids - Freedom


Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

Rugverstelling (1a en 1b)

Fowler-verstelling (3a en 3b)

Sta-op verstelling* (5a en 5b)

Houd de linkerpijl (5a) ingedrukt om van lig naar zitpositie te gaan. Het systeem stopt automatisch bij de rand van het bed. Bij bedden met ook de kantel functie zal bij nogmaals indrukken deze functie geactiveerd worden. Indien nodig kan het bed door de hoog-laag verstelling (4a) hoger worden ingesteld voor het uitstappen.

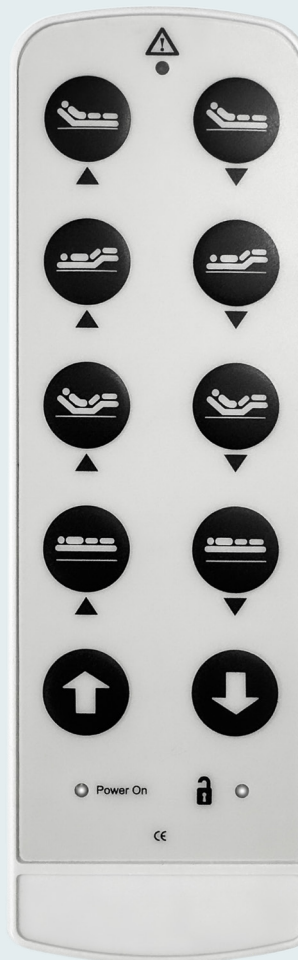

Beenverstelling (2a en 2b)

Hoog-laag verstelling (4a en 4b)

Resetfunctie: 4a en 4b tegelijkertijd ingedrukt houden totdat er 4 piepjes klinken.

Led-mode

Wanneer lampje niet brandt staat het bed in de geblokkeerde stand. Wanneer het lampje wel brandt kan het bed gebruikt worden (het lampje moet oranje branden om gebruik te kunnen maken van de sta-op functie).

Snelgids - Freedom

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

*** Belangrijk VOORDAT sta-op verstelling wordt gebruikt:**

- Let erop dat BEIDE doorlopende zijhekken naar beneden zijn gezet.
- Zorg dat de wielen op de rem staan.



Voorkom overbelasting, letsel en schade:

Wanneer iets klem komt te zitten tijdens het draaien, stopt de motor automatisch. Daarna moet worden onderzocht waarom het klemt en moet het probleem worden opgelost voordat het bed weer mag worden bediend.



Met de sleutel kan de afstandsbediening worden aangepast voor de veiligheid van de zorgvrager. Draai de pijl naar:

1. Het dichte slotje BOVEN:
alle functies blokkeren (led-mode lampje is uit)
2. Het open slotje RECHTS:
alle functies werken (led-mode lampje is oranje)
3. De streepjes LINKS:
in en uitstappen blokkeren (led-mode lampje is groen)

Raadpleeg voor meer informatie
de handleiding van Freedom



Bij het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik vervalt de garantie

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214 | info@ato-form.nl
www.ato-form.nl