


# SNELGIDS SHAPE BASE



Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



The image shows a white Shape Base chair on the left and a control panel on the right. The control panel is a vertical touch screen with eight numbered icons: 1. A small circle (System indicator), 2. An upward arrow (Up), 3. A downward arrow (Down), 4. A chair icon tilted forward (Tilt forward), 5. A chair icon tilted backward (Tilt backward), 6. A power button (On/Off), 7. A warning triangle (Overload alarm), 8. A battery icon (Battery indicator). The panel also features the 'dan rehab' logo at the bottom.

- 1 Systeemindicator
- 2 Omhoog
- 3 Omlaag
- 4 Naar voren kantelen
- 5 Naar achteren kantelen
- 6 Aan/Uit
- 7 Overbelasting alarm
- 8 Batterij-indicator

Voor resetfunctie, knop 4 en 5 gedurende 7 seconden tegelijk ingedrukt houden.

Bij vervoer van de zorgvrager moet de stoel altijd in de laagste stand staan.

De stoel moet minimaal 6 uur voor het eerste gebruik worden opgeladen.

**Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.**



De zorgverleners die Shape Base bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO FORM of een geautoriseerde dealer.

Alleen zij mogen Shape Base bedienen. ATO FORM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



## Opladen batterij

De accu-indicator (LED3) licht in alle 3 indicator-velden op wanneer de accu voldoende is opgeladen. De accu moet UITERLIJK dan worden opgeladen wanneer alleen nog het lampje van het onderste niveau van de afstandsbediening oplicht.

## De stoel niet opladen:

- In een vochtige kamer
- Als de stoel nat is
- Met een gebruiker in de stoel

## Let op:

De indicator licht alleen op wanneer de stoel is ingeschakeld. De stoel wordt automatisch ingeschakeld bij het indrukken van de pijltjes.

Laad de stoel verder indien nodig op, maar minimaal eenmaal per week. Het wordt echter aanbevolen om de stoel elke dag/nacht op te laden om ervoor te zorgen dat deze altijd opgeladen en klaar voor gebruik is.

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



**LET OP: ZET DE STOEL AAN DE LADER ZODRA DEZE PIEPT EN DE BATTERIJ GROEN KNIPPERT.**

## Voorkom schade en overbelasting:

- Zorg ervoor dat de zijkanten, voor- en achterzijde vrij zijn tijdens kanteling of hoogteverstelling.
- Plaats de stoel tijdens gebruik niet onder een object of dicht tegen een wand.
- Bij het in- en uitstappen van de gebruiker moet bijzondere aandacht worden besteed aan eventueel kantelgevaar.
- Duw **VÓÓR** het kantelen de po langs het kleine verticale gedeelte op de geleiderail, zodat deze er niet uitvalt bij het kantelen.



- Wees alert op een mogelijke beknelling van weefsels of vingers door het omlaag klappen van de armleuningen!

- Bij in- en uitstappen en bij kantelen moeten de wielen zijn vergrendeld en mogen de rempedalen van de wielen **NIET** onder de stoel "wijzen"!
- Ga nooit op de voetplaten van de voetsteunen staan.
- Vergrendel de voorwielen en laat de rempedalen van de stoel afwijzen om kantelen van de stoel te voorkomen bij een sterk naar voren leunende zorgvrager.
- Verwijder haar of andere materialen uit de wielen.



## Noodsituatie / Nulstelling



In het geval van onbedoeld rijden, of wanneer een andere vorm van gevaar zich voordoet, kan de noodstop worden gebruikt door de STOPknop met de voet in te drukken.

Wanneer de stopknop niet op zijn plaats is, kan de stoel niet bewegen omdat alle stroom naar het systeem is uitgeschakeld. Om opnieuw te worden geactiveerd, wordt de stopknop eenvoudig op zijn plaats teruggeklikt. De knop springt vanzelf op zijn plaats via de ingebouwde magneet.

Vuil kan zich ophopen op de magnetische aansluiting, maak deze na gebruik steeds schoon om volledige werking te garanderen.

## Aandachtspunten:

- Noodstop: Na verloop van tijd kunnen zich zeepresten en ander vuil rondom de magnetische aansluiting ophopen. Om een goede werking van het hulpmiddel te garanderen, wordt aanbevolen de noodstop regelmatig met een doek schoon te maken en af te drogen.
- De stoel kan worden schoongemaakt met een niet bijtend, standaard schoonmaakmiddel en met water (geen hoge druk) worden afgespoeld.
- De zitting kan ook schuin naar voren kantelen om opstaan te vergemakkelijken.
- Zet de stoel na kanteling weer horizontaal.

## Schoonmaken!

Spoel de stoel schoon na ieder gebruik. Verwijder hiermee urine en ontlasting die anders het oppervlak kunnen aantasten. Maak de stoel regelmatig schoon met een niet bijtend, standaard schoonmaakmiddel, zoals waterstofperoxide (Aq. 1,0% max) en zeep (max. PH-waarde 9), en spoel vervolgens met water af (geen hoge druk). Zie de handleiding voor de schoonmaakinstructies.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Shape Base

Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk | 085 - 77 34 214  
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl