

SNELGIDS SHAPE/SOLID/ANYTOILET



Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



- 1 Omhoog
- 2 Omlaag
- 3 Naar voren kantelen
- 4 Naar achteren kantelen
- 5 Batterij-status

Bij vervoer van de zorgvrager moet de stoel altijd in de laagste stand staan.

Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



De zorgverleners die Shape/Solid/Anytoilet bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Shape/Solid/Anytoilet bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



Voorkom schade en overbelasting:

Zorg ervoor dat de zijkanten, voor- en achterzijde vrij zijn tijdens kanteling of hoogtevaststelling.

Plaats de stoel tijdens gebruik niet onder een object of dicht tegen een wand.


Bij het in- en uitstappen van de gebruiker moet bijzondere aandacht worden besteed aan eventueel kantelgevaar.

Zorg er VÓÓR het kantelen voor dat de po langs het verticale gedeelte van de geleiderail wordt geduwd, zodat deze er niet uitvalt bij het kantelen.

Wees alert op een mogelijke beknelling van weefsels of vingers door het omlaag klappen van de armlenningen!

Bij in- en uitstappen en bij kantelen moeten de wielen zijn vergrendeld en mogen de rempedalen van de wielen NIET onder de stoel "wijzen"!

Ga nooit op de voetplaten van de voetsteunen staan. Als de gebruiker sterk naar voren leunt, bestaat het risico dat de stoel kantelt als de voorwielen niet zijn vergrendeld en als de rempedalen niet van de stoel afwijzen.

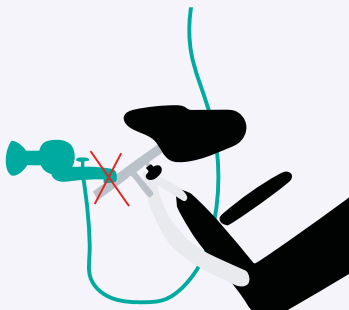

Opladen batterij

Laad de stoel het liefst op zodra de "Batterij-status" op de middelste stand staat (geel lampje op handbediening). Aan de rechterzijde van de stoel bevindt zich een laad-aansluiting (rode cirkel). Verwijder de plug en plug de lader in. De batterij is opgeladen als het lichtje op de oplader groen is.



Na het laden de plug er weer in doen!

Schoonmaken!

Spoel de stoel schoon na ieder gebruik. Verwijder hiermee urine en ontlasting die anders het oppervlak kunnen aantasten. Maak de stoel regelmatig schoon met een niet bijtend, standaard schoonmaakmiddel, zoals waterstofperoxide (Aq. 1,0% max) en zeep (max. PH-waarde 9), en spoel vervolgens met water af (geen hoge druk). Zie de handleiding voor de schoonmaakinstructies.



Aandachtspunten:

- De zitting kan ook schuin naar voren kantelen om opstaan te vergemakkelijken.
- Verwijder haar of andere materialen uit de wielen.
- Zet de stoel na kanteling weer horizontaal.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Shape/Solid/Anytoilet

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl