

# SNELGIDS TURN ALL



Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

## TURN ALL wisselingsysteem



**Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.**



De zorgverleners die Turn All bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Turn All bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



1



2



3



4

1. Zet het bed in de Fowler-positie met de rug en beenverstelling omhoog. Bevestig de 3 bevestigingsbanden van Turn All aan het beweegbare inlegraam om verschuiving te voorkomen.

2. Plaats de pomp aan het voeteneinde van het bed.

3. Koppel de luchtslang en stekker aan de pomp zonder knelpunten in de slang en steek de stekker in het stopcontact.

4. Leg het eigen matras over Turn All. Let erop dat dit een soepel matras is.

### Zo schoon!

Door het matras komt Turn All normaalgesproken niet in aanraking met vocht waardoor deze dan alleen met een normale desinfectans gereinigd hoeft te worden aan de buitenkant.



### Geen Fowler-positie?

Let er dan extra op dat de banden aan het beweegbare inlegraam vastgemaakt worden.

Hierdoor voorkomt men dat de banden scheuren wanneer een rugverstelling gebruikt wordt.



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Turn All

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214  
info@ato.nl | www.ato.nl

# SNELGIDS TURN ALL


Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik



1. Aan / Uit-knop

2. Stel het gewenste aantal gebruikersuren in (maximaal 24 uur). Het systeem onthoudt deze instelling, zodat na het herstarten van de pomp de teller doorgaat vanaf het laatst ingestelde aantal uren.

3. Stel de gewenste draaicyclus in van 30, 60 of 90 minuten per zijde. De zorgvrager ligt gedurende die tijd op één kant, waarna het systeem binnen 5 tot 7 minuten naar de andere kant draait voor dezelfde duur.

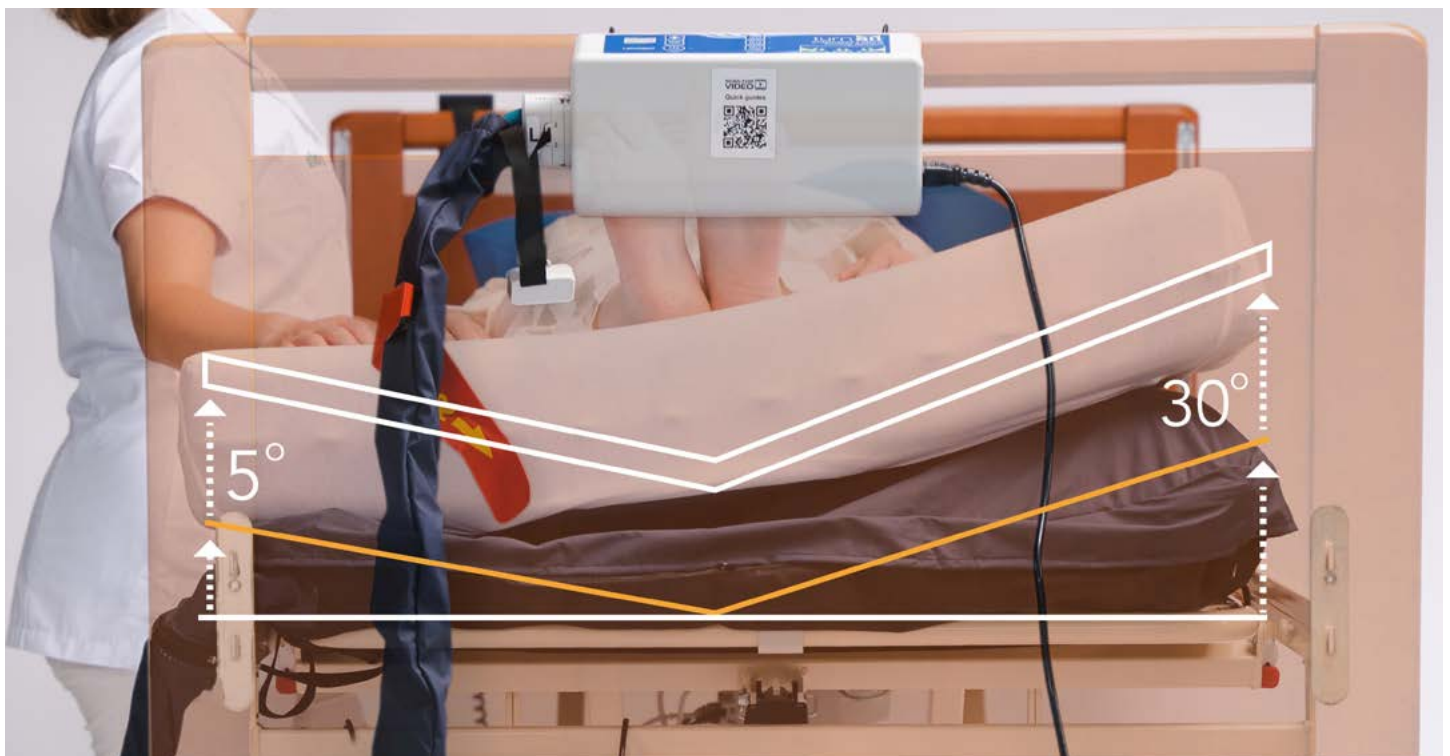

- Turn All kan worden gecombineerd met een wisseldruksysteem door Turn All eronder te plaatsen.

- Bij het uitschakelen van de pomp ontluicht het systeem binnen 2 minuten.

- Bij voorkeur beddekken omhoog bij het gebruik van Turn All.

- Om de zorgvrager op een specifieke kant te laten slapen, zelfs als het systeem aan de andere kant begint met oppompen, draai de luchtslang 180° en sluit deze opnieuw aan op de pomp.

- Bij het loskoppelen van de luchtslang wordt het matras direct ontluicht. De CPR zorgt binnen 15 seconden voor snelle ontluichting bij calamiteiten. Plaats daarna de stop weer terug.

- Turn All is een mooi hulpmiddel, maar blijf altijd alert op wijzigingen in de toestand en/of omstandigheden van de zorgvrager.