

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

HANDBEDIENING


1. LED Snelheidsindicator

3. Snelheidsbediening

Bepaalt de snelheid waarmee de motorrollen wentelen. Deze is aan te passen tussen 50%, 75% en 100%

5. De bedieningsknop voor het oprollen van resp. rode en groene motorrol

Hierdoor neemt de spanning op het wentellaken toe en kunt u de zorgvrager draaien of verschuiven

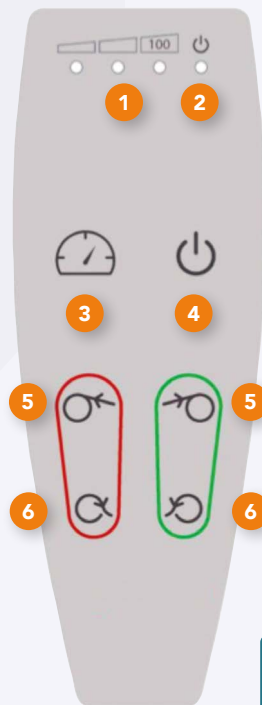

2. De 'AAN' LED

Led brandt geel zodra deze klaar is voor gebruik en gaat uit als het systeem niet actief is

4. AAN/UIT KNOP

Activeer de TurnAid door deze knop tweemaal \pm 1 seconde in te drukken. Druk eenmaal om te activeren uit slaapstand ('AAN' LED knippert).

Tevens noodstop

Druk de knop langer dan 2 seconden in. Deze brandt geel wanneer het systeem actief is

6. De bedieningsknop voor het afrollen van resp. rode en groene motorrol

De spanning op het wentellaken neemt af

Voorkom overbelasting en schade:

Bij verkeerd gebruik raken de motors overbelast. Zorg ervoor dat het matras plat ligt, zowel bij het hoofd- als voeteneinde. Hierdoor is de weerstand op het wentellaken evenredig verdeeld over de rollen, en raken de motors niet overbelast. Daarbij moet er altijd een glijlaken bevestigd zijn op het matras, direct onder het wentellaken.

Let op bij rug- en/of beenverstelling:
Voor rug- en/of beenverstelling is het noodzakelijk dat het wentellaken genoeg ruimte biedt om deze handeling uit te kunnen voeren. Rol beide motorrollen tegelijkertijd iets af, zodat het wentellaken in het midden blijft.

Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



De zorgverleners die TurnAid bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen TurnAid bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



VOETBEDIENING

3. Snelheidsbediening

Bepaalt de snelheid waarmee de motorrollen wentelen. Deze is aan te passen tussen 50%, 75% en 100%



5. De bedieningsknop voor het oprollen van resp. rode en groene motorrol

Hierdoor neemt de spanning op het wentellaken toe en kunt u de zorgvrager draaien of verschuiven

6. De bedieningsknop voor het afrollen van resp. rode en groene motorrol

De spanning op het wentellaken neemt af

4. AAN/UIT KNOP

Activeer de TurnAid door deze knop tweemaal \pm 1 seconde in te drukken. Voetbediening schakelt automatisch uit nadat deze 1,5 minuten niet gebruikt wordt



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van TurnAid

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik


MONTAGE

Monteer de TurnAid zoals rechts afgebeeld om beknellingen en verwondingen te voorkomen.

De groene rol moet rechts gemonteerd worden en de rode rol links vanuit het perspectief van de zorgvrager.

LET OP: De zorgvrager dient tijdens het wentelproces te allen tijde de rollen en het hekwerk niet aan te raken.

RECHTS
van de
zorgvrager

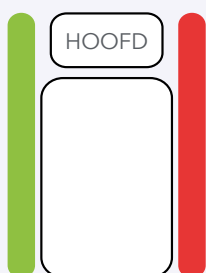

LINKS
van de
zorgvrager



Controleer altijd of de Turnaid goed is geplaatst. Zet de hekken omhoog (met de wentelrol naar beneden). Voel met je **VLAKKE** hand onder de rol. Dit moet de bovenkant van het matras zijn. Druk je tegen de zijkant van de matras dan staat deze te laag. TurnAid moet dan hoger ingesteld worden.



1. Bedhek positie aanpassen:

Zorgvrager van rug naar zij wentelen: motorrol omhoog kantelen



A. blauwe knoppen aantrekken

2. Transfer in en uit bed:

Bedhek omlaag klappen na het aantrekken van de zwarte knoppen



Voorkom overbelasting en schade:

Zorg ervoor dat u 'Bedhek omlaag klappen' (2) niet uitvoert als de rol nog omhoog staat, zoals te zien in plaatje C.

Breng eerst de rol omlaag, dan kan het bedhek naar beneden worden geklapt voor een transfer.




B. bedhek naar beneden duwen tot de klik (=vergrendeld)

3. Uitgeklapt bedhek:

Voor transfer in en uit bed



4. Bedhek omhoog bij verlaten zorgvrager

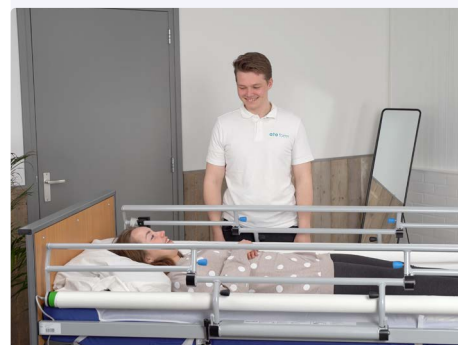

C. motorrol staat omhoog, klaar voor wentelen zorgvrager

5. Het aanbrengen van een nieuw glijlaken:

- Leg het glijlaken op het matras en plaats de elastieken om iedere hoek van het matras.
- Breng het hoofd (1) en voeteneinde (2) van het matras omhoog.
- Bevestig de klittenbandstroken aan het inlegraam, waarop het matras ligt (zie onderstaande foto's)

