


# TURNAID DE VOORDELEN

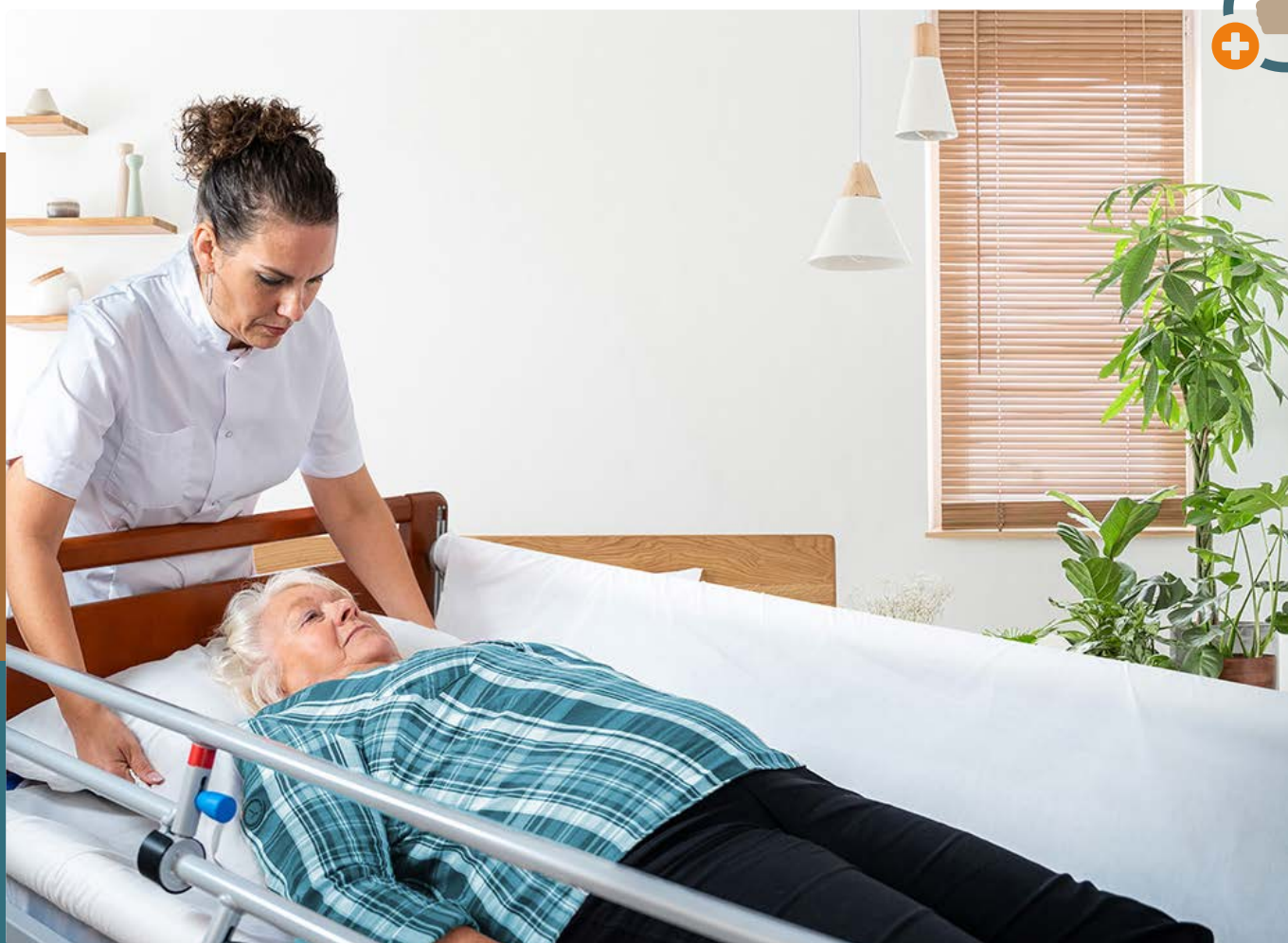

WERKING  
VOORDELEN  
VEELGESTELDE VRAGEN

LOGISTIEK  
CERTIFICATEN EN TESTEN  
SERVICE EN INSTALLATIE

VOOR MENSEN DOOR MENSEN

# HOE WERKT TURNAID

TurnAid is een elektrisch wentelsysteem dat helpt bij het draaien en verplaatsen van de zorgvrager in bed. Heeft de zorgvrager pijn of moeite met het draaien of is er sprake van druk- en/of schuifkrachten of zelfs wonden? Is wisselgigging belangrijk om het herstel te versnellen of klachten te verlichten? Dan is TurnAid een uitkomst.

TurnAid bestaat uit twee unieke kantelbare beddekkensystemen, voorzien van een ingenieus rolsysteem met een wentellaken. Verzorgers en mantelzorgers kunnen de zorgvrager met de TurnAid gemakkelijk draaien en horizontaal verplaatsen in bed. Door het glijlaken onder het wentellaken wordt de zorgvrager met weinig weerstand gedraaid of verplaatst. Bediening is eenvoudig met de hand- of voetbediening.

Met TurnAid kun je de zorgvrager verplaatsen zonder lichamelijk contact te hoeven maken. Het past op nagenoeg alle hoog/laag bedden. Ook het plaatsen van de TurnAid is eenvoudig uit te voeren en neemt weinig tijd in beslag. Het kan door één persoon worden uitgevoerd.

## VOORDELEN VAN TURNAID



TurnAid is te gebruiken als beddekkensysteem waarbij de **gebruiker gewoon uit het bed kan kijken**. Dit in tegenstelling met de andere systemen waar men tegen de lakens kijkt.

TurnAid heeft als grote voordeel t.o.v. wisselgiggingssystemen dat de **zorgvrager volledig op de zij kan worden gedraaid**, waarbij er alle ruimte is om ADL uit te voeren. Bij wisselgiggingssystemen is dit niet het geval, hierbij zit het matras in de weg en kan er geen verzorging plaatsvinden. TurnAid kan de zorgvrager **horizontaal verplaatsen** om **minder statische belasting** te krijgen



TurnAid heeft een mechanische kantelverstelling voor de rollen, dit is een **snelle en bedrijfszekere uitvoering** op het moment dat de zorgvrager gedraaid dient te worden.

TurnAid is **belastbaar tot maar liefst 350 kg**. Eén systeem volstaat en er hoeven geen speciale obesitasversies (bij andere partijen vaak veel duurder dan het standaardmodel) te worden aangeschaft.



TurnAid past op **nagenoeg alle bedden**. De **universele bracket** maakt het mogelijk om snel en effectief TurnAid te plaatsen op verschillende bedden.

TurnAid kan worden gebruikt om iemand vanuit de **zittende positie** van de **rand van het bed naar het midden van het bed** te verplaatsen.



De afstandsbediening is eenvoudig uit gevoerd. Daarnaast is de **de vorm duidelijk anders dan die van het bed** om verwarring te voorkomen.

Voetbediening waardoor de zorg **belde handen vrij** heeft. Het maakt het werken hygiënischer en efficiënt.

TurnAid is vanaf 2021 standaard uitgevoerd met **"speed control"**, waarbij het mogelijk is om met 3 verschillende snelheden het wentelen uit te voeren. De snelheden kunnen eenvoudig met de handbediening of voetbediening worden ingesteld.

**Montage** mag, na opleiding door ATO, worden uitgevoerd door **eigen personeel**. Maar natuurlijk ondersteunen we graag bij aflevering/montage.

Levering is **vanuit voorraad**.

De transfer vanuit het bed is heel **comfortabel**. Dat komt omdat de rol lager is dan het matras tijdens de transfer.

Bij calamiteiten kan de TurnAid **snel en handmatig naar beneden** worden gekanteld voor een transfer uit bed.

De **unieke licht gebogen bedrail** nodigt de zorgverlener uit om met het hek omhoog de ADL uit te voeren. Een zeer groot voordeel met betrekking tot de statische belasting en dat leidt tot **minder fysieke klachten**.



# VEELGESTELDE VRAGEN



<p>TurnAid is breder dan andere wentelsystemen, sta je hierdoor niet verder van de cliënt?</p>	<p>Het werken met de TurnAid is anders dan met de andere systemen. We adviseren om bij het werken met de TurnAid de <b>hekken omhoog</b> te plaatsen. De lichtgebogen vorm van de hekken nodigt uit om op deze manier met minder statische belasting te kunnen werken. Dus bij goed gebruik sta je niet verder van de cliënt, maar juist <b>dichterbij!</b></p>
<p>Kan TurnAid op een extra laag bed worden gemonteerd?</p>	<p>De 11-gaats TurnAid steekt bij een standaard matrasdikte 12 cm onder het frame uit. Deze kan <b>heel goed</b> worden toegepast op extra lage bedden.</p>
<p>Kan TurnAid de cliënt horizontaal verplaatsen?</p>	<p>Doordat het een hekvervangend systeem is kun je een horizontale verplaatsing met de cliënt doen met het hek omhoog. De rollen zitten dan op <b>matrasniveau</b> en de cliënt kan op een veilige manier <b>maximaal</b> naar links of rechts worden verplaatst. Bij de andere systemen zitten de rollen omhoog en ligt de cliënt in een holle buis (bij wijze van spreken). Bij een horizontale verplaatsing zal de cliënt naarmate ze dichterbij de zijkant van het bed komt gedraaid gaan worden.</p>
<p>Waarom kunnen de rollen niet elektrisch worden bediend?</p>	<p>Er is voor een mechanische verstelling gekozen voor het bedienen van de rollen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het zorgt voor een snellere montage.</li><li>• <b>Minder storingen</b> doordat er minder bedrading benodigd is en minder actuators.</li><li>• De bediening gaat <b>sneller</b> dan bij elektrisch verstelbaar.</li><li>• Minder functies op de afstandsbediening zorgt voor minder (foutieve) keuzes.</li><li>• De <b>gasveer</b> ondersteunt je bij het bedienen van het hek zodat je niet fysiek wordt belast. Dit in tegenstelling tot andere systemen, waarbij men vanuit het hoofdeinde en voeteneinde moet bedienen (omhoogtrekken) wat in de praktijk als te zwaar ervaren wordt.</li></ul>
<p>Hoe gebruik je TurnAid als het bed tegen de muur staat en je maar aan één kant kunt werken?</p>	<p>In dat geval kun je de rol aan de muurzijde gewoon standaard omhoog laten staan. Normaal zet je de rol pas omhoog wanneer je iemand wilt draaien, maar omdat je aan die kant van het bed toch niet meer kunt komen, is het praktisch om het omhoog te zetten. Dit is veilig en voldoet nog steeds aan de geldende heknormen, terwijl je aan de werkszijde van het bed comfortabel met TurnAid kunt werken.</p>

## LOGISTIEK

Er is een praktische trolley beschikbaar om TurnAid eenvoudig te vervoeren en te monteren en in het magazijn op te slaan. Hierdoor worden kosten bespaard en kwaliteit geborgd tijdens de hele workflow van afleveren tot opslag. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor verhuur.

Hoe werkt het? De zijsteunen met de bijbehorende accessoires worden op de trolley geplaatst en bij de zorgvrager eenvoudig naar binnen gereden. Men plaatst de trolley naast het bed, zet het bed op de juiste hoogte totdat het bedhek vanaf de trolley wordt getild. Vervolgens wordt de TurnAid met de bouten vastgezet. Eenvoudiger kan het niet.

De trolley kan ook worden gebruikt voor opslag zodat de TurnAid onbeschadigd en compleet met de onderdelen in en uit het depot kan worden gehaald.



## CERTIFICATEN EN TESTEN

- TurnAid is getest volgens de meest recente normen en getest en goedgekeurd als '**wentelsysteem**'.
- Verification of compliance RL 2017 10015C en RL 2017 10014C.
- De TurnAid is als systeem **EMC getest** volgens de strenge eisen van IEC 60601-1-2\_2014.
- TurnAid geeft in hun gebruiksaanwijzing aan dat de verwachte technische levensduur **10 jaar** is.

## SERVICE EN INSTALLATIE

- Voor de montage van TurnAid is een installatiebox beschikbaar. Deze bevat diverse types achterplaten, bouten en een verbredingsset, zodat je **altijd het juiste materiaal** bij de hand hebt.
- Daarnaast is er een servicebox verkrijgbaar met essentiële onderdelen, zodat de meeste reparaties **direct en op locatie** kunnen worden uitgevoerd.
- Met 3D-weergave en AR kun je TurnAid van alle kanten bekijken, tot in detail.

# weturn VOORDELEN TURNAID



MEER WETEN?  
SCAN DE CODE



Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214  
info@ato.nl | www.ato.nl